

Notice d'utilisation du doppler Angelsounds JPD-100S


COMMENT UTILISER VOTRE DOPPLER?

- 1* Ouvrez la partie batterie et placez 1 pile DC9V avant utilisation.
- 2* Insérez le casque dans la prise casque.
- 3* Tournez la molette pour allumer l'appareil et l'indicateur lumineux de fonction s'allume.
- 4* Utilisez un peu de gel ultrason en appliquant une noix sur le ventre.
- 5* Placez la sonde de l'appareil sur le ventre.
- 6* Lorsque les battements du cœur de votre bébé ne sont pas ou peu perceptibles, bougez la sonde afin de déterminer la position optimale et ajustez.
- 7* Vous pouvez enregistrer grâce au câble d'enregistrement relié à un magnétophone ou à votre ordinateur. Ce dernier devra être muni d'un logiciel d'enregistrement.
- 8* Vous pouvez également écouter votre cœur et l'enregistrer pour le faire écouter plus tard à votre bébé après la naissance afin de l'apaiser.
- 9* Pour éteindre, tournez la molette et l'indicateur lumineux s'éteint.



Fonctions et schémas d'illustration

1. On/off et molette volume haut/bas
2. Indicateur lumineux
3. Prise casque
4. Sonde

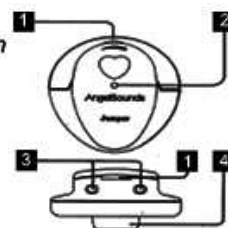

AIDE

Mon doppler ne fonctionne pas? Il n'émet aucun son, le voyant n'est pas vert.

Vérifiez si la pile est bien déballée, bien ajustée et dans le bon sens.

Vérifiez que la molette d'intensité soit bien en marche.

N'hésitez pas à utiliser une pile neuve de marque, les piles d'essai fournies avec un appareil électronique peuvent s'avérer trop faibles.

Le voyant est vert mais je n'entends rien.

Vérifiez que le câble soit bien branché

Vérifiez que la molette de volume soit suffisamment ajustée.

Le voyant est vert, cela grésille mais je n'entends pas mon bébé.

Si vous êtes à moins de 14 semaines, il faudra patienter un peu.

Veuillez noter quand sans gel ultrason ou liquide comparable, le son ne passera pas.

Enfin, un peu de patience même avec l'habitude, il faut parfois attendre de longues minutes avant d'entendre bébé. Tout dépend de sa position dans votre bébé.

AVANT DE NOUS RETOURNER votre doppler, veuillez impérativement nous contacter. En effet, dans la majorité des cas, un peu d'aide suffit pour entendre avec bonheur votre enfant.

MISE EN GARDE

L'appareil Angelsounds n'est pas un dispositif médical et n'a aucun but de diagnostic.